


ДЕНТАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМЕР В 10 ЭТАПОВ


01

Подготовьте зуб путем **тщательного его высушивания в струе воздуха**, удалите остатки всех предыдущих процедур (лечения корневых каналов, пломбы и пр.). Можно использовать все части зуба, включая корни и нервы, нет необходимости удалять эмаль.

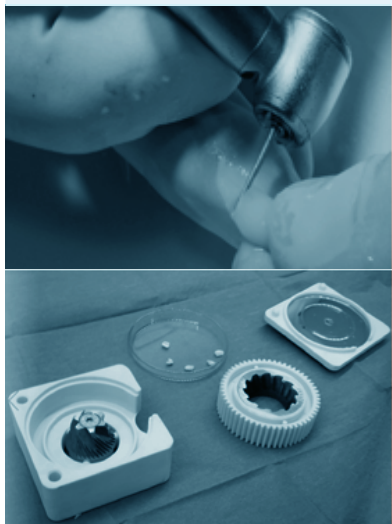

02

Поместите зубы в мельницу, MAX 3 грамма. Проверьте размеры, оптимально 5 мм x 5 мм. Мельница должна быть стерилизована в автоклаве. Средний срок службы мельницы – 100 хирургических процедур.

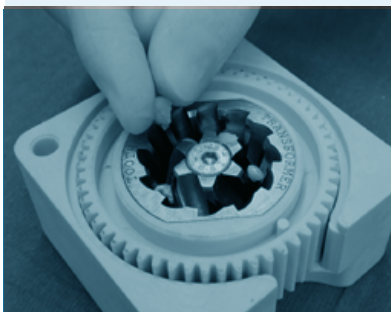

03

Подсоедините шнур электропитания.



04

Включите дентальный трансформер путем нажатия на кнопку на задней стороне.



05

Полностью откройте крышку.



В случае если дентальный трансформер не работает, или появляется ошибка на дисплее, мы рекомендуем повторить процедуру и посмотреть обучающее видео на нашем веб-сайте www.toothtransformer.com.

После первого этапа процесса дентальный трансформер остановит работу, что обеспечит возможность проверить содержимое внутри мельницы (которая должна быть пустой) и наличие гранулята в собирающем контейнере. После проверки (все зубы измельчены, и гранулят находится в собирающем контейнере) необходимо повторить процедуру, начиная с пункта 6. Продолжительность процедуры составляет от 20 до 25 минут в зависимости от количества зубов и их размера. Хранение: можно хранить целый зуб, части зубов или гранулят (перед второй фазой). Материал, полученный по окончании цикла, может использоваться в течение 3 часов. Регенерационный материал, производимый дентальным трансформером, может использоваться с другими регенерационными материалами.

ДЕНТАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМЕР В 10 ЭТАПОВ


06

Установите мельницу, осторожно вставив ее до конца желоба и фиксации в этом положении, ТОЛЬКО КОГДА ДЕНТАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМЕР ВКЛЮЧЕН.



07

Установите картридж с жидкостями в соответствующем месте, как показано на рисунке (наклейкой вверх). Осторожно вставьте картридж до конца желоба.

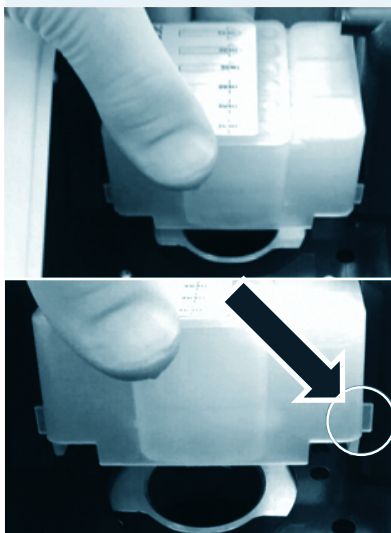

08

Проколите картридж острым стерилизованным инструментом. Картридж предназначен только для однократного использования, он не может использоваться для более чем одной хирургической процедуры. НЕ прокалывайте картридж в нижней части.



09

Установите цилиндр с собирающим контейнером в выемку. Удостоверьтесь в том, что он расположен правильно и содержит все части, как показано на рисунке.



10

Закройте крышку и жестко нажмите на кнопку START («ПУСК») для запуска процесса.

Внимание! Не забывайте очищать дентальный трансформер сжатым воздухом из стоматологической установки после каждого цикла.



В случае если дентальный трансформер не работает, или появляется ошибка на дисплее, мы рекомендуем повторить процедуру и посмотреть обучающее видео на нашем веб-сайте www.toothtransformer.com.

После первого этапа процесса дентальный трансформер остановит работу, что обеспечит возможность проверить содержимое внутри мельницы (которая должна быть пустой) и наличие гранулята в собирающем контейнере. После проверки (все зубы измельчены, и гранулят находится в собирающем контейнере) необходимо повторить процедуру, начиная с пункта 6. Продолжительность процедуры составляет от 20 до 25 минут в зависимости от количества зубов и их размера. Хранение: можно хранить целый зуб, части зубов или гранулят (перед второй фазой). Материал, полученный по окончании цикла, может использоваться в течение 3 часов. Регенерационный материал, производимый дентальным трансформером, может использоваться с другими регенерационными материалами.