

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКА

1. Чистка наконечника:

Чистить кожух наконечника мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе. Такие методы очистки как кипячение, погружение в химический раствор, растирание металлическими щетками или промывка в ультразвуковых очистителях запрещены для наконечников.

Очистить картридж турбины промывкой под давлением спреем или маслом для смазки через воздухо-подающую трубку наконечника. Включите наконечник покрытый бумажной тканью до исчезновения черноты.

2. Смазка

Проводить смазку дважды в день. Мы рекомендуем использовать спрей PANA или турбинное масло NSK, входящее в комплект наконечника, так как эти вещества точно подходят картриджам турбин.

При использовании спрея PANA пользуйтесь насадкой и проводите смазку в воздухо-подающую трубку в течение 1-2 секунд.

Предупреждение:

Аэрозоль охлаждает подшипники картриджа мгновенно, следовательно не следует включать наконечник сразу после проведения смазки аэрозолем, а подождать в течение 2-3 минут до восстановления картриджем своей нормальной температуры, в противном случае картридж может быстро сломаться.

При смазывании турбинным маслом, следует нанести 2 или 3 капли масла за один раз в воздухо-подающую трубку наконечника.

3. Процедура обработки в автоклаве:

Очистить кожух наконечника и картридж для удаления всех видов грязи до того, как поместить наконечник в автоклав в соответствии с методами очистки, описанными выше.

Смазать картридж спреем PANA или турбинным маслом перед обработкой в автоклаве.

Поместить наконечник в стерилизационный пакет и заклеить его. Обращать внимание на все рекомендации, относящиеся к стерилизационным пакетам.

Стерилизовать при температуре:	максимальная темп. 121 С ...20 мин.
	максимальная темп. 132 С...15 мин.

Внимание: Ни при каких обстоятельствах не применять сухожаровую стерилизацию.