

Инструкция по эксплуатации на эргономический матрас для стоматологического кресла

Матрасы MEDISO для стоматологических кресел и медицинских изделий изготовлены из высококачественных, износостойких, и гипоаллергенных экологически чистых материалов. Матрасы MEDISO соответствуют всем российским и европейским стандартам.

Применяемые не промокаемые и дышащие материалы обивки/чехла, в комплекте с материалом наполнителя Memory Foam, который способен подстраиваться под тело пациента, реагируя на его температуру и вес, обеспечивают пациентам максимальный уровень комфорта во время проведения длительных стоматологических процедур.

Матрас можно применять как на старом кресле стоматологической установки с эстетической целью (освежить вид кресла, применить новый цвет), так и на новом кресле для более комфортного размещения пациента.

Для того чтобы Ваш матрас прослужил долго, пожалуйста, прочитайте эту Инструкцию и следуйте её рекомендациям:

1. Достаньте матрас из упаковки и разместите его на кресле стоматологической установки.
2. Зафиксируйте матрас с помощью застёжек.
3. При необходимости матрас можно обрабатывать мыльным раствором или дезинфицирующими средствами, кроме хлорсодержащих.
4. Матрас оснащен съёмным чехлом, который можно стирать в машинке при температуре до 60 С.
5. При возникновении дополнительных вопросов касательно эксплуатации матраса просим связываться с производителем по указанным в паспорте телефонам и электронной почте.

КОМПАНИЯ MEDISO работает для Вас и с большой благодарностью примет все замечания и предложения касательно качества и модернизации нашей продукции.